

UniGloves®

Luvas de látex para
procedimento não cirúrgico

Não estéril

Conforto Premium Quality

YELLOW



FÁCIL CALÇAMENTO



AMBIDESTRA



BARREIRA BIOLÓGICA



SUPERFÍCIE MICROTENZURIZADA



MAIOR ESPESSURA



MACIEZ, ALTO CONFORTO E
AJUSTE ADEQUADO ÀS MÃOS



PUNHO ALONGADO, GARANTINDO
CONFORTO E SEGURANÇA



UM TOQUE DE
COR NO SEU
DIA A DIA

COMPOSIÇÃO:

Alta concentração de látex 100% natural, sem pó

SEM PÓ

Superfície
microtexturizada



REDUÇÃO
DE REAÇÕES
ALÉRGICAS

PROTEÇÃO E SENSIBILIDADE

Ideais para pessoas sensíveis ao pó bioabsorvível. Para manter a maciez, o conforto e a sensibilidade tátil no calçamento e remoção das luvas, utilizamos o processo de cloração que torna sua superfície deslizante e também remove o excesso de proteínas do látex, mantendo-o em níveis abaixo de 50ug/g e reduzindo, significativamente, o risco de alergia.

100
unidades

Embalagem maior
FÁCIL MANUSEIO

QUALIDADE

- ✓ Conformidade com a Portaria 332/2012 - INMETRO
- ✓ Fabricação de acordo com o sistema de qualidade ISO 13485/2016 (Boas práticas de fabricação)

TAMANHO

- ✓ Extrapequena
- ✓ Pequena
- ✓ Média
- ✓ Grande



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Tipo	Sem pó, não estéril
Material	Látex de borracha natural de alta qualidade
Características	Ambidestra, superfície microtexturizada, punhos com bainha
Cor	Amarelo
Armazenamento	As luvas mantêm suas propriedades quando armazenadas em lugares secos e em temperaturas de até 40°C
Validade	5 anos da data de fabricação

DIMENSÕES FÍSICAS

DIMENSÕES	PADRÃO UNIGLOVES	PADRÃO PORTARIA 332/2012 - INMETRO
Comprimento (mm)	240 mínimo	220 mín. (Tamanhos XP e P) 230 mín. (Tamanhos M, G e XG)
Largura (mm)		
✓ Extrapequena	76 + ou - 3	< 80
✓ Pequena	84 + ou - 3	80 + ou - 10
✓ Média	94 + ou - 3	95 + ou - 10
✓ Grande	105 + ou - 3	110 + ou - 10
Espessura em parede simples (mm)		
✓ Dedos	0.12 + ou - 0.03	0.08 mínimo
✓ Palma	0.11 + ou - 0.03	0.08 mínimo

PROPRIEDADES FÍSICAS

PROPRIEDADES	PADRÃO UNIGLOVES		PADRÃO PORTARIA 332/2012 - INMETRO	
	Antes do envelhecimento	Depois do envelhecimento	Antes do envelhecimento	Depois do envelhecimento
Alongamento ao ponto de ruptura (%)	Até 910	Até 890	650 mínimo	500 mínimo
Tensão de resistência (MPa)	Até 13	Até 9.8	7 mínimo	6 mínimo

41 3027.5454

Rua Santa Catarina, 293 Água Verde
CEP 80620-100 / Curitiba PR / Brasil
comercial@unigloves.com.br

UniGloves®

www.unigloves.com.br